

Rygbetjening til Tofistol. Vejledning:

Rygbetjeningen skal monteres på højre side af stolen og lære at snakke sammen med stolen inden den er klar til brug.



1. Hold en af knapperne på rygbetjeningen inde, og tryk samtidig kortvarigt på den øverste knap bagpå ryggen af din Tofistol (model 2015). Når ryggen begynder at køre, slip knappen på rygbetjeningen igen. Se evt manualen til stolen.
2. Monter rygbetjeningen i det bagerste hul under sædet på Tofistolen:

A: sæt fingerskruen i indefra



B: Hold rygbetjeningen op mod underkanten af sædet, så fingerskruen fanger gevindet i rygbetjeningen. Så er betjeningen klar til brug.

Hvis rygbetjeningen begynder at "bippe", når og lige efter den har været aktiveret, er det tid til at skifte batteri.

Det gøres på denne måde:

1. Afmonter Rygbetjeningen med fingerskruen.
2. Skru de 4 skruer i hvert hjørne bag på rygbetjeningen ud og åbn rygbetjeningen.
3. Udskift batteriet (CR123A)
4. Saml rygbetjeningen igen, og monter den på stolen, som beskrevet ovenfor.

